

**Warunki transportu próbek materiałów do badań:**

Rodzaj próbki	Zakres temperatury transportu	Maksymalny czas transportu	Wymogi specjalne
Krew obwodowa pobrana na EDTA	od 6-25 °C	Do 24 godz od pobrania	
Aspirat szpiku pobrany na EDTA	od 6-25 °C	Do 24 godz od pobrania	
Płyn mózgowo-rdzeniowy pobrany do probówki polipropylenowej	od 6-25 °C	Do 1 godz. od pobrania	Jeżeli powyżej 1 godz. konieczne dodanie utrwalcza TransFix.
BAL, materiał z biopsji cienkoigłowej, inne płyny ustrojowe i wysiękowe pobrane do probówki/naczynka z polipropylenu	od 6-25 °C	Do 1 godz od pobrania	
Węzeł chłonny umieszczony w soli fizjologicznej 37°C		Do 2 godz od pobrania	